

EOH 17/03/2020



1- Réaliser une hygiène des mains



2- Saisir le FFP2 par les côtés

(La partie devant est fragile ne pas la manipuler)



3- Ouvrir le FFP2 et séparer les élastiques en 2



4- Placer le FFP2 sous le menton



5- Etirer les élastiques derrière la tête

(Sans manipuler la partie avant du FFP2)



6- Placer un élastique au-dessus des oreilles et un en dessous



6- Ajuster le FFP2 sous le menton jusqu'à la base du cou



7- Ajuster le FFP2 en pinçant la barrette sur le nez

- S'assurer que le FFP2 **couvre le nez, la bouche et le menton**
- Réaliser un **fit check\***
- **Ne pas manipuler** le FFP2 lorsqu'on le porte
- **Changer de FFP2** dès qu'il est humide (durée maximale =8 h pour le port d'un même appareil)
- **Jeter le FFP2** dans un sac DASRI
- **Se frictionner les mains** après avoir retiré le FFP2



## **\*Fit-check :**

Après avoir bien positionné le FFP2 et bien serré la barrette nasale, obturer la surface filtrante avec les mains, inspirer puis retenir sa respiration quelques secondes. Le FFP2 doit se plaquer légèrement sur le visage, sinon le réajuster et recommencer le test.

## **Pour retirer mon FFP2**

Maintenir le FFP2 par les côtés puis attraper les deux élastiques et les faire passer doucement par devant, éliminer dans les DASRI puis réaliser une hygiène des mains.



**Réaliser une hygiène des mains**